



錠剤監査システム

鑑査レンジ/audit

調剤過誤対策の新提案！

錠剤監査システム

調剤業務の安全と安心をサポートします



コンセプト

急速に高齢化が進む中、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて、関係機関がさまざまな形で連携を取り始めております。

それに伴い、薬局の果たす役割や求められる機能も拡大し、一人一人の薬剤師についてもますます負担が増加する傾向にあります。

そのような状況において、錠剤監査システムは、調剤過誤防止、薬剤師の負担を軽減等、調剤薬局の中で非常に重要な役割を果たします。

既に導入されたお客様からも、ジェネリック医薬品の普及に伴うピッキングミスへの対策として、非常に高い評価を頂いており、調剤報酬改定後は更に多くのお客様への導入が進められております。

監査システムは患者さまに安心や安全を与え、信頼関係を構築し、より質の高い医療サービスを提供する為の手助けをします。

商品の概要

「鑑査レンジ」は、カメラで撮影した画像と薬品マスタの画像との画像照合によりチェックを行う、新たな鑑査システムです。調剤時の薬剤取り揃えミスを防止し、患者さまに安全と安心をお届けします。

処方内容に含まれる薬剤の登録画像と、実際に取り揃えた薬剤を画像照合することで、間違っている薬剤はどれか、モニター上で確認が可能です。照合した画像は記録され、あとで再確認もできます。ICタグやバーコードに頼らず、類似薬剤や規格違いなどの人の思い込みによるミスを排除し、より安全で確実な調剤をサポートします。

簡単一操作は三つ

1. 取り揃えた薬剤トレイをセット
2. 受付一覧画面から患者をタッチ
3. 「鑑査」ボタンをタッチ

安全—画像照合で薬剤の取り揃えミスを未然に防止。

安心—鑑査結果の画像を保存

後日、患者さまからの問い合わせがあったときは画像を見ながら応答することができます。

○特徴

ヒート表裏照合

薬品マスタに表裏それぞれの特徴を登録することで、表裏どちらでも照合が可能です。

複数トレイでの分割照合

投薬量によりトレイが複数になっても照合が可能です。

関連チェック機能

間違い易い錠剤を登録しておくことで鑑査時に「x」印を表示することができます。

照合画像印刷

照合した画像を印刷することができます。（別途プリンタが必要です）

約4,500薬品のマスタ画像を初期提供

初期マスタとして約4,500薬品のマスタ画像を初期提供させていただきます。

※本初期提供マスタはすべての薬品についての照合を保証するものではありません。

※提供マスタに含まれていない薬品、デザインが変更になった薬品等は、各店舗にて登録をお願いします。

マスタ受信機能

インターネットを介して更新/追加されたマスタ画像を取り込むことができます。

※追加発売された薬品、デザイン変更となった薬品のマスタをすべて保証するものではありません。

バーコード一括読取機能


PTPシート等に印刷されているバーコードを一括で認識できます。

1店舗複数台対応

1日の処方箋枚数が多い薬局様向けに、最大3台まで導入することができます。

処方箋受付情報、画像鑑査結果情報を各鑑査レンジ間で共有し、それぞれ別々の患者様のお薬を同時に鑑査することができます。

○チェックの流れ

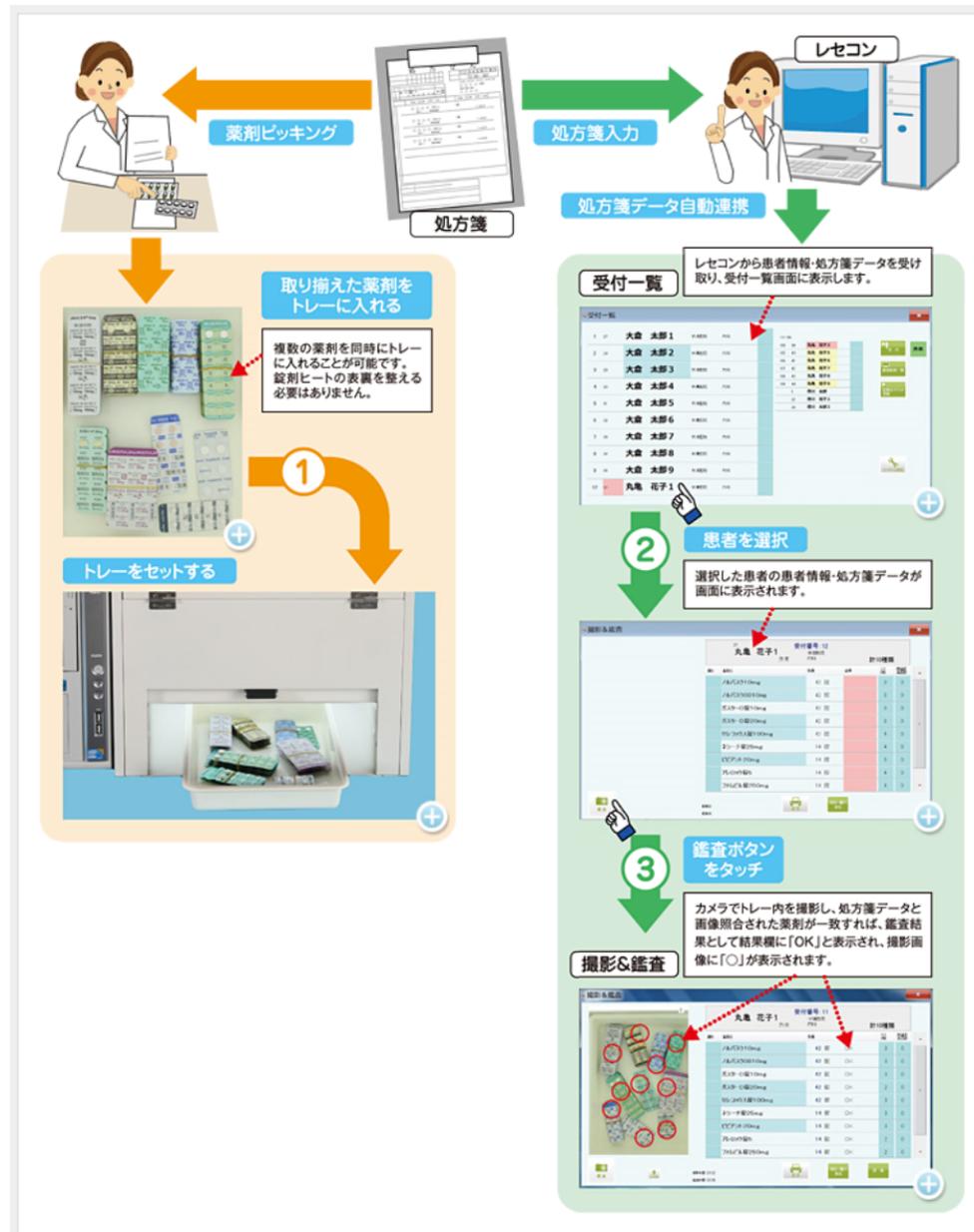

○鑑査結果の確認

鑑査結果一覧から保存している鑑査情報を照会することができます。

また、鑑査結果一覧の並び替え、絞り込みも可能です。

鑑査結果一覧

患者ID	名前	医療機関	診療科	外来	鑑査終了時刻	鑑査結果
44	丸亀 花子9	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:43:46	OK
43	丸亀 花子8	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:43:06	OK
42	丸亀 花子7	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:42:45	OK
41	丸亀 花子6	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:42:18	OK
40	丸亀 花子5	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:41:46	OK
39	丸亀 花子4	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:41:04	OK
38	丸亀 花子3	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:40:43	OK
37	丸亀 花子2	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:40:19	OK
36	丸亀 花子1	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:37:32	OK
35	大倉 太郎9	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:36:36	OK
34	大倉 太郎8	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:36:29	OK
33	大倉 太郎7	中津病院	内科	外来	2011/09/26 17:36:21	OK

見たい鑑査
結果を選択

照会

薬品名	数量	結果	錠	錠数
ノルバスク10mg	42錠	OK		3 0
ノルバスクOD10mg	42錠	OK		3 0
ガスター-D錠10mg	42錠	OK		3 0
ガスター-D錠20mg	42錠	OK		3 0
セレコックス錠100mg	42錠	OK		4 0
ネシーナ錠25mg	14錠	OK		4 0
ビピアント20mg	14錠	OK		3 0
アレロック錠5	14錠	OK		4 0
ファムビル錠250mg	14錠	OK		4 0

指定薬品の
拡大表示

薬品名	数量	結果	錠	錠数
ノルバスク10mg	42錠	OK		3 0
ノルバスクOD10mg	42錠	OK		3 0
ガスター-D錠10mg	42錠	OK		3 0
ガスター-D錠20mg	42錠	OK		3 0
セレコックス錠100mg	42錠	OK		4 0
ネシーナ錠25mg	14錠	OK		4 0
ビピアント20mg	14錠	OK		3 0
アレロック錠5	14錠	OK		4 0
ファムビル錠250mg	14錠	OK		4 0

○外形



外形寸法：(W) 400× (D) 430× (H) 430mm

重量：約20kg (パソコン、外付けHDD含まず)

連動形式：NSIPS準拠

<http://www.casio-info-sys.jp/product/kansa/kansarenji.html>